

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ KOMFORT 2v1

Návod k obsluze

ÚČEL VÝROBKU

Toto chodítko je vhodné pro osoby s pohybovými problémy. Může být použito i jako pomocný prostředek k usnadnění ambulantní péče. Rozhodně ji nemohou používat lidé se zjevnou poruchou ruky a ramene, a to i lidé s poruchou rovnováhy. Chodítko lze použít v interiéru i exteriéru. Doporučujeme používat na rovném povrchu, kde se všechna kola dotýkají povrchu. Nesmí být používáno na kamenném povrchu, ani na šikmé ploše, chodítko pak může být nestabilní. Zařízení není určeno k převážení lidí nebo věcí.

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce. Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy výrobku za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

OBEČNÁ VAROVÁNÍ

Nikdy neinstalujte ani nepoužívejte zařízení dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud se vám nedaří porozumět varování, upozornění nebo pokynům, obraťte se na obchodního zástupce nebo na technický personál před pokusem o instalaci tohoto zařízení, aby nedošlo ke zranění nebo poškození přístroje.

UŽIVATELSKÁ VAROVÁNÍ

- Zajistěte, aby byl bovden brzdy správně nastaven.
- Ověřte správnou funkci brzdy po každém nastavení výšky, abyste zabránili případnému nesprávnému vedení či ohnutí bovden lanka brzdy.
- Porušení těchto základních pravidel může způsobit osobní újmu.
- Chodítko lze používat pouze na tvrdém a rovnoměrném povrchu. Nepoužívejte přístroj pro stoupání po schodech.
- Udržujte rovnováhu vždy na obou madlech.
- Věnujte zvláštní pozornost při pohybu po vlhkém, ledovém nebo zasněženém povrchu.
- Zařízení nepřetěžujte.
- Nepoužívejte sedačku pro přepravu osob nebo materiálu, sedadlo je určeno pro sezení uživatele pouze při stání a je možné pouze s aktivovanou parkovací brzdou. (Musí být trvale zabržděno.)
- Všechna kola musí být během používání stále v kontaktu s povrchem, aby se zajistilo správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost.
- Před použitím sedadla musí být chodítko zabržděno.
- **Poznámka:** Pokud je chodítko používáno jako opora v nehybné poloze, musí být ruční brzda aktivována. Chodítko musí být trvale zabržděno.

NOSNOST:

Chodítko může být používáno osobou s hmotností do 100 kg, VČETNĚ úložného vaku.
Max. nosnost úložného vaku je 5 kg.

UPOZORNĚNÍ PRO SESTAVENÍ:

- Ověřte, zda-li po rozložení ze složeného stavu jsou obě části rámu chodítka rozevřeny na maximum a rozpěra mezi těmito částmi je zajištěna na doraz a je ve vodorovné poloze.
- Obě rukojeti musí být bezpečně zajištěny v trubkách hlavní části šrouby s plastovou hlavicí
- Nezavěšujte nic na rám chodítka – hrozí poškození. Poškození rámu může způsobit nesprávnou funkci, ovladatelnost a následně i zranění.
- Při rozkládání a skládání chodítka dbejte opatrnosti a zamezte skřípnutí, zachycení prstů a /nebo oděvu.

OBEČNÝ POPIS



PŘED POUŽITÍM

Vždy zkontrolujte:
Zda všechny části chodítka jsou bezpečně zajištěny.
Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené.
Ujistěte se, že sedadlo je řádně zajištěno.
Zkontrolujte, zda je sedadlo ve správné poloze.
Zkontrolujte správnou funkci obou brzd.
Zkontrolujte opotřebení částí výrobku, aby bylo zaručeno, že výrobek bude zcela bezpečný pro uživatele a jeho okolí.

PŘED MONTÁŽÍ

Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda výrobek nebyl poškozen během přepravy. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

SESTAVENÍ MODELU

Rozložení chodítka

Rozložte chodítko roztažením obou částí rámu na maximum a zajistěte boční rozpěry mezi těmito částmi na doraz, aby byla ve vodorovné poloze. Zasuňte trubky rukojetí do rámu a zajistěte, viz popis níže.

Nastavení rukojetí

Nastavte výšku rukojetí pomocí postranních šroubů s plastovými hlavicemi nasazených do požadovaných otvorů trubek rukojetí. Odšroubujte šroub a vysuňte jej z trubky rámu, umístěte rukojetí do požadované výšky, nasuňte šroub zpět skrze trubku rámu a trubku rukojetí do otvoru dle zvolené výšky a otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček a opět jej utáhněte. Zopakujte s druhou rukojetí a ujistěte se, že obě rukojeti jsou umístěny ve stejné výšce.

VAROVÁNÍ:

Ujistěte se, že pozice rukojetí je v souladu se směrem pohybu chodítka. Pokud rukojeť nezůstane rovná, hrozí nebezpečí, že se chodítko bude třást nebo se převrhne, zvláště pokud jej tlačíte větší silou. Proto musí být zajišťovací šrouby trubek rukojetí pevně utaženy.

Instace opěrného ramene:

Opěrné rameno nasuňte oběma konci trubky do objímek na trubkách rámu. Opěrku je možno takto umístit na obě strany rámu a tím si zvolit stranu sezení. U varianty sezení ze předu je možno využít spodní opěrku chodidel, kterou lze při nepoužití sklopit směrem do chodítka.

Složení chodítka

Zatáhněte za postranní rozpěrná ramena směrem nahoru a obě části rámu přisuňte k sobě. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo k usklínutí prstů nebo zachycení oděvu.

Nákupní košík

Nákupní košík je připevněn pomocí dvou háků k rámu chodítka.

VAROVÁNÍ: Používejte košík pouze pro drobné předměty. Nepřeplňujte košík, hrozí riziko převrácení!

Sedadlo

Před usednutím umístěte chodítko na rovnou a pevnou plochu a pak uzamkněte brzdy. Ujistěte se, zda jsou brzdy pevně zajištěny a zda je chodítko ve stabilní poloze.

VAROVÁNÍ: Sedněte si tak, abyste rozložili váhu na sedadlo. Nesedejte pouze k jedné straně.

PRAKTICKÉ POUŽITÍ

- Začněte tlačit chodítko, když jste ve vzpřímené poloze a s oběma rukama na rukojetích.
- Ujistěte se, že jsou vaše ruce suché, aby se zabránilo nebezpečí sklouznutí.
- Při chůzi udržujte vzpřímenou pozici s očima směřujícími dopředu a ne dolů.
- Netlačte chodítko příliš daleko od těla, což může způsobit pády a nesprávné zatížení.
- Nepoužívejte chodítko k překonání překážek vyšších než 20 mm
- Při použití venku dávejte přednost chodníkům.

Brzdy

Jak zabrzdit

Chcete-li zabrzdit chodítko, zatáhněte brzdovou páčkou prsty směrem nahoru, až se chodítko zpomalí nebo se zastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu, uvolněte páčku brzdy.

Uzamčení brzdy

Stiskněte brzdovou páčku směrem dolů. Když uslyšíte „kliknutí“, kolečka jsou zablokována.

VAROVÁNÍ: Pokud se s chodítkem nepohybuje, vždy zabrzďte kola.

Odblokování kol

Zatáhněte za obě páčky brzdy, dokud se brzdy neuvolní.

ÚDRŽBA

V případě potřeby opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Při opravách se používají pouze originální náhradní díly a příslušenství. Doba životnosti výrobku závisí na použití, údržbě, skladování a čištění.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Čištění

Při čištění dílů používejte pouze vlhkou utěrku s neutrálním čistícím prostředkem. Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které by mohly během čištění poškodit povrch výrobku nebo korozivní chemikálie.

Dezinfekce

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol a čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu.

Údržba kol

Očistěte kola teplou vodou a jemným mycím prostředkem. Osušte je čistým hadříkem. Kola jsou osazeny ložisky, které je potřeba občas promazat.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kód produktu										
Sedadlo	34x38 cm									
Konstrukce	ocel									
Rozměry a hmotnost										
Rozměry v cm										
	70	85 92	54	63	57	65x21x84	5			max. nosnost 100 kg

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Magyar kézikönyv letöltése innen: Descarca manualul in romana de aici: Slovenský návod na stiahnutie tu: Instrukcja w języku polskim do pobrania tutaj:

