

# OPORA K VANĚ

CZ

## Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojeni. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Tato pomocná opěrka usnadňuje vstupování do vany a činí jej bezpečnějším.

### Důležité pokyny

Je bezpodmínečně nutné uschovat tyto pokyny pro pozdější použití! Před prvním použitím zakoupeného zboží si pozorně přečtěte návod k použití, především bezpečnostní pokyny. Návod uschovejte pro pozdější upotřebení. Pokud předáte produkt třetí osobě, předejte společně s ním i návod k použití.

Předložený návod k použití je určen pro tento výrobek a obsahuje informace důležité pro jeho sestavení a manipulaci. Přečtěte si celý návod.

Nerespektování pokynů uvedených v návodu může vést k vážným úrazům nebo poškození výrobku.

### Důležité

- Maximální zatížení opěrky činí 100 kg! Tento výrobek nesmí používat více osob současně.
- Používejte opěrku v souladu s účelem jejího použití a respektujte při tom tento návod.
- Neprovádějte žádné změny konstrukce a nepoužívejte výrobek společně s jinými kusy nábytku nebo jinými částmi jiných zařízení.
- Nepřipevňujte žádné dodatečné části.
- Tento výrobek je zkonstruován pouze pro soukromé používání v domácnosti. Není vhodný pro jakýkoli způsob komerčního použití (např. v nemocnicích, domovech důchodců atd.)
- Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen, a proveďte kontrolu správného upevnění sešroubovaných částí. V případě pochybností výrobek nepoužívejte, hrozí nebezpečný úraz.
- Svévolně neprovádějte žádné opravy, v takovém případě by zanikl nárok na uplatnění záruky.
- Za účelem provedení opravy kontaktujte autorizované servisní pracoviště.
- Je-li výrobek používán dětmi, nebo v blízkosti dětí



či osob, jimž v užívání brání nějaké omezení, pak by měla být v dosahu dozorující osoba (a popř. pomocná síla). Tento výrobek není hračka.

- Dbejte na to, aby byla opěrka aplikována vždy na stabilně.
- Obalový materiál nenechávejte v blízkosti dětí. Hrozí nebezpečný udušení!

### Obsah dodávky a obal

Nejdříve, prosím, zkontrolujte, zda je obsah dodávky kompletní a zda je dodané zboží bez závad. V případě pochybností výrobek nepoužívejte a kontaktujte servisní pracoviště.

Obsah balení:

- opěra tvaru U (díl 1)-1 ks
- přídržné rameno (díl 3) - 1 ks
- příčka pro zavěšení ručníku (díl 4) - 1 ks
- plastový úchyt (díl 2) - 2 ks
- opěra ke stěně vany (díl 5) - 2 ks
- gumový chránič (díl 6) - 1 ks
- plastová záslepka (díl 7) - 2 ks
- šroub s imbusovou hlavou - 2 ks
- imbusový klíč - 1 ks
- krátký vrut - 2 ks
- dlouhý vrut - 4 ks

Pokud při rozbalování výrobku zjistíte závadu způsobenou při transportu, ihned kontaktujte svého prodejce.

## Pokyny k montáži opory:

Na hlavní část opěry tvaru U (díl 1) nasuňte plastové úchyty pro přídržné rameno a příčku pro zavěšení ručníku (díly 2). Do delších objímek úchytlů zasuňte přídržné rameno (díl 3). Z protější strany prošroubujte šrouby a řádně dotáhněte. Z té samé strany nasuňte příčku pro zavěšení ručníku (díl 4). Příčku zajistěte pomocí dvou vrutů. Na hlavní část opěry tvaru U (díl 1) nasuňte opěry ke stěně vany (díly 5). Každou zajistěte pomocí vrutů. Na přídržné rameno nasadte gumový chránič (díl 6) a na oba konce hlavní opěry tvaru U (díl 1) nasadte plastové záslepký (díly 7).



## Varování

Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen a proveďte kontrolu správného upevnění sešroubovaných částí. V případě pochybností výrobek nepoužívejte, hrozí nebezpečí úrazu!

## Údržba

K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, nečistoty a prach odstraňujte měkkým popř. lehce navlhčeným hadříkem. V případě výskytu silného znečištění použijte běžný neutrální čisticí prostředek.

## Technické údaje

Vhodné pro okraj vany : 65-120 mm  
Maximální zatížení: 100 kg  
Rozměr: 52 x 22 x 24,5 cm

## Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
  - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
  - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
  - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
  - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

# Instrukcja obsługi – Podpórka do wanny

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzmy, że będą Państwo w pełni zadowoleni z użytkowania tego urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera informacje pomocne w trakcie użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Podpórka ułatwia wchodzenie do wanny.

## Uwaga!

Należy zachować instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie! Przed pierwszym użyciem zakupionego produktu należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, a przede wszystkim z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przekazując produkt kolejnemu użytkownikowi, należy dołączyć do niego instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona wyłącznie dla produktu, z którym jest dostarczana i zawiera ważne informacje dotyczące jego montażu i eksploatacji. Przed rozpoczęciem użytkowania podpórki należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi. Nie przestrzeganie zawartych w niej zaleceń może być przyczyną poważnych obrażeń lub doprowadzić do uszkodzenia produktu.

## Ważne!

- Maksymalne obciążenie podpórki to 120 kg! Z urządzenia nie może korzystać większa ilość osób jednocześnie.
- Produkt powinien być wykorzystywany do celów, do których jest przeznaczony zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Nie wolno wprowadzać zmian w konstrukcji produktu ani używać go w połączeniu z elementami meblowania lub innych urządzeń.
- Nie wolno dołączać do podpórki żadnych dodatkowych elementów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno używać go komercyjnie (np. w szpitalach, domach spokojnej starości itd.).
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony oraz przeprowadzić kontrolę poprawności dokręcenia wszystkich połączeń śrubowych. Niestabilna podpórka może być spowodować poważne obrażenia.
- Nie wolno samemu wykonywać napraw, ponieważ grozi to utratą gwarancji.
- Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu serwisowi.
- Jeżeli podpórka jest używana przez dzieci lub w pobliżu dzieci bądź osób o ograniczonej sprawności ruchowej, powinny być one dozorowane przez osobę służącą pomocą. Produkt nie jest zabawką.
- Należy zawsze zwracać uwagę na to, żeby podpórka stała stabilnie.
- Pozostałości opakowania należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się!

## Zawartość opakowania

Po zakupieniu produktu należy sprawdzić czy dostarczono wszystkie jego elementy oraz czy nie są one uszkodzone. Jeżeli zmontowana podpórka nie stoi stabilnie, nie wolno z niej korzystać. W takim przypadku należy skontaktować się z punktem serwisowym.

W opakowaniu znajdują się: elementy konstrukcyjne podpórki, woreczek ze śrubami oraz podkładki dylatacyjne i podpierające. Jeżeli podczas rozpakowywania elementów produktu zauważysz jakąkolwiek usterkę, skontaktuj się ze sprzedawcą.

## Zalecenia dotyczące montażu

### Montaż:

Włóż ramię mocujące w główny element podpórki w kształcie „U” (w obejmie z otworami), a do otworów w obejmach wsuń śruby dystansujące wkręcając je lekko w gwint ramienia. Załóż gumowe końcówki na główny element podpórki (4 szt.). Można użyć dwustronnej taśmy samoprzylepnej, żeby ramię lepiej stykało się z wanną. W takim przypadku należy przykleić taśmę zamiast gumowych końcówek (zawsze 1 kawałek taśmy zamiast 2 końcówek). Tak przygotowaną podpórkę dośuń do ścianki wanny (tak, jak to pokazano na rysunku znajdującym się na opakowaniu) a następnie wkręć śruby tak głęboko, żeby ramię podpórki dobrze dolegało do zewnętrznej strony wanny. W ten sposób podpórka zostanie ustabilizowana. Dzięki tym śrubom podpórka wraz z wanną stanowią jedność. Aby